

Korte neus sneltest

Gebruiksaanwijzing

Inhoud:

- Wattenstaafje
- Testcassette
- Buishouder
- Flacon met vloeibare oplossing
- Nederlandse gebruiksaanwijzing



Voor uw professionele schoonmaakartikelen




De testcassette zit luchtdicht verpakt, gebruik deze na openen zo snel mogelijk i.v.m. de geldigheid van de test.



Inclusief handige buishouder!




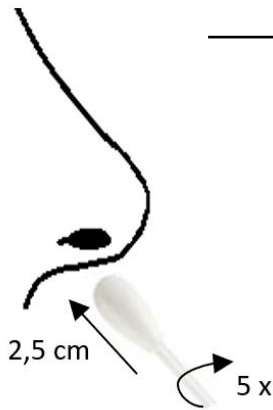

1. Snuit uw neus goed. Neem het wattenstaafje uit de verpakking, houd het hoofd zo recht mogelijk en draai het staafje op 2,5 cm diepte vijf keer rond tegen de binnenkant van het neusgat

2. Herhaal stap 1 voor het andere neusgat, gebruik hetzelfde wattenstaafje

3. Draai de blauwe dop van de flacon met vloeibare oplossing, stop het wattenstaafje in de vloeistof en draai 30 seconden rond

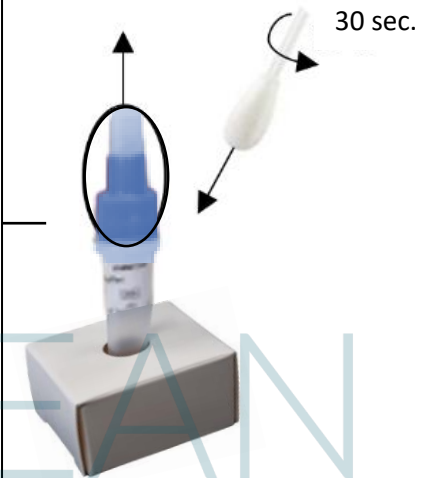

4. Druk het wattenstaafje uit door de wanden van de flacon in te drukken, draai dan de blauwe dop weer op de flacon



5. Draai het doorzichtige dopje van de flacon en druppel viermaal op het rondje boven de 'S' op de testcassette



6. Wacht 15 minuten en lees dan het resultaat af; de test is geldig als de controlestreep bij 'C' zichtbaar is en de uitslag in elk geval binnen 30 minuten wordt afgelezen.

